

**HARTMANN**



## Bacillol® 30 Sensitive Foam

Materjalisõbralik kiirdesinfektsioonivahend, mis sobib ka tundlikele pindadele. Esimene allergigute ja astmaatikute sõbralik professionaalne pinnadesinfektsioonivahend.



- Pihustatav vaht
- Kasutusvalmis desinfitseeriv lahus
- Väga kiire toime
- Erakordselt materjalisõbralik; sobib tundlikele materjalidele nagu Makrolon®, Plexiglas® ja polüsulfonaat
- Ei sisalda aldehüüde, värvi- ja lõhnaaineid
- Väga hea puhastusvõimega
- Suurepärase märguvusega
- Kasutatav ilma kinnasteta\*
- ECARF-sertifikaat\*\*: esimesed allergikute ja astmaatikute sõbralikud pinnadesinfektsiooni rätikud

\*Juhul kui infektsioonikontrolli ja töötervishoiu protokoll seda lubab.

\*\* the world's leading testing, inspection and certification company

# Bacillo® 30 Sensitive Foam

## Kasutamine

Tänu unikaalsele koostisele ja vahu moodustumisele on Bacillo® 30 Sensitive Foam väga sobilik alkoholile tundlike pindade kiirdesinfektsiooniks. Toode sobib kunstnaha, monitoride, kuvarite, klaviatuuride, kontrollpaneelide ja muude statsionaarsete ja portatiivsete meditsiiniseadmete puhastavaks desinfektsiooniks. Tootel on tõendus põhine sertifikaat, mis lubab seda ilma probleemideta kasutada tundliku ja atoopilise naha ning astmaatiliste probleemidega kasutajatel.

## Kasutusvaldkond

Bacillo® 30 Sensitive Foam sobib mugavaks, materjalisõbralikuks pestavate pindade puhastavaks desinfitseerimiseks:

### Meditsiinilised seadmed ja vahendid (MDR):

- Tundlikust materjalist ekraanid, klaviatuurid, muud meditsiiniseadmetest portatiivsed ja staatilised elektroonikaseadmed: monitorid, konsoolid jne
- Tundlikust materjalist mitte-invasiivsed meditsiiniseadmed; mammograafiaseadmed, operatsioonilambid jne

### Pinnadesinfektsioon Biotsiidiseaduse (BPR) mõistes:

- Tööpinnad kliinikutes, esmatasandis, hambaravis, kiirabis.
- Tundlikust materjalist ekraanid, klaviatuurid, muud elektroonikaseadmed: mobiiltelefonid, arvutid, nutiseadmed
- Tundlikud pinnad – valmistatud Makrolon®-st, akrüülklaasist, kunstnahast jne
- Tundlikud pinnad, köögis, toidu serveerimise alal, solaariumis jne.

## Kasutusjuhend

Bacillo® 30 Sensitive Foam-i võib kasutada ilma kinnasteta (juhul kui asutuse sisekorra eeskirjad seda lubavad). Bacillo® 30 Sensitive Foam tuleb pihustada otse pindadele ning pühkida kuiva lapiga laiali, tagades pindade piisav katvus ja kontakt desinfektsioonivahendiga. Pudeli külge kinnitatud vahustav pihusti aitab kaasa pinna ühtlasele katvusele.

Vertikaalsete ja ebaühtlaste pindade desinfitseerimiseks (monitorid, klaviatuur, kontrollpuldid) pihustada Bacillo® 30 Sensitive Foam lahus kuivale ühekordsele lapile/paberile ning siis hoolikalt laiali pühkida, tagades kõikide pindade katvus.

Lahus ei tohi sattuda elektrooniliste seadmete sisse.

Hoolikalt jälgida meditsiiniseadmete tootjate poolt välja antud desinfitseerimise juhiseid.

Mitte kasutada invasiivsete meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks.

Ühelt tootelt teisele vahetades tuleb teostada mehaaniline vahepuhastus.

Lahjendamata toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

## Bacillo®30 Sensitive: sertifitseeritud allergia ja astmasõbralikkus

Bacillo® 30 Sensitive Tissues ja Bacillo® 30 Sensitive Foam on sertifitseeritud ja omavad ECARF (*European Centre for Allergy Research Foundation*) allergia- ja astmasõbraliku toote kvaliteedimärki.



ECARF Seal of Quality


Nahasõbralikkust hinnati aplikatsioonitesti abil. Atoopilise dermatiidiga uuritavad kasutasid Bacillo® 30 Sensitive Tissues ja Bacillo® 30 Sensitive Foam tooteid rohkem kui 7 päeva. Hinnati ka Bacillo® Sensitive Foam-i respiratoorset taluvust ruumiõhus astmaatilise fooniga uuritavatel. Kopsufunktsioone hinnati arsti poolt enne ja pärast toote kasutamist. Mõlemad tooted osutusid kõikide uuritavate poolt hinnatuna väga hästi talutavaks nii dermatoloogilises kui ka respiratoorses kontekstis ning lisaks ei põhjustanud ka sügelust. Mõlema testi tulemused vastavad rangetele kriteeriumitele, mis on vajalikud ECARF kvaliteedisertifikaadi saamiseks. Tooteid kasutades ei tekkinud kliinilise seisundi halvenemist ning sellest lähtuvalt ei ole tõenäoline allergia tekkimine toodete kasutamisel.

References: 1. Zuberbier T (2021): ECARF Studie 033-R-21. Unpublished study – data available at BODE Chemie GmbH.  
2. Zuberbier T (2021): ECARF Studie 021-S-21. Unpublished study – data available at BODE Chemie GmbH.

# Bacillol® 30 Sensitive Foam

## Tõestatud efektiivsus

<b>Kasutamise soovitus, pinnadesinfektsioon (Põhineb suspensioon ja praktilistel testidel)</b>	Bakteritsiidne + pärmitsiidne (EN 13727 + EN 13624 + EN 16615)	saastunud	1 min
	Virutsiidne, (incl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476 + EN 16777)	saastunud	1 min
<b>Bakterid</b>			
Efektiivsus, EN Faas 2 / Aste 1 (suspensioontest)	Tuberkulotsiidne toime (EN 14348)	saastunud	3 min
	Mükobakteritsiidne toime (EN 14348)	saastunud	3 min
<b>Viirused</b>			
Efektiivsus, ümbriseta viirused	Noroviirus (EN 14476)	saastunud	2 min
	Adenoviirus (EN 14476)	saastunud	30 min
	Rotaviirus (EN 14476)	puhas	1 minut
	Polüomaviirus (EN 14476)		30 min

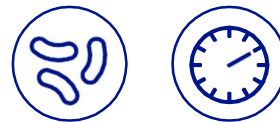

## Mikrobioloogia

- bakteritsiidne
- pärmitsiidne
- tuberkulotsiidne
- mükobakteritsiidne
- virutsiidne, ümbrisega viirused (k.a HBV, HIV, HCV)
- limiteeritud spektriga virutsiidne toime
- polüomaviirus

## Koostis

Toimeained: Etanool 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g, Amiinid, N-C10– C16-alküültrimetüüli-, reaktsiooni saadus kloroäädikhappega(CAS number 139734-65-9) 2 mg/g.



# Bacillo® 30 Sensitive Foam

	Sisaldus	Item no.
<b>Bacillo® 30 Sensitive Foam</b>	750 ml 5 L	on request on request



*Kasuta desinfectioonivahendeid turvaliselt. Alati enne kasutamist loe etiketti ja tutvu kasutusjuhendiga.*



- 1 Zuberbier T (2021): ECARF Studie 033-R-21. Unpublished study – data available at BODE Chemie GmbH.
- 2 Zuberbier T (2021): ECARF Studie 021-S-21. Unpublished study – data available at BODE Chemie GmbH.
- 3 Segger D. (2021): SGS Study No. 204-01-0029. Unpublished study – data available at BODE Chemie GmbH.

Turustamise eest vastutab:

Semetron AS Veerenni 51, 10138 Tallinn (7. korrus), tel 6837600



Helps. Cares. Protects.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Germany

Phone: +49-7321-36-0  
Fax: +49-7321-36-3636  
info@hartmann.info  
www.hartmann.info

(01.22)