


# WIP'ANIOS Excel

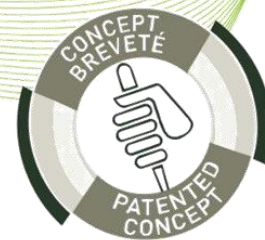

- 100% Biolagunevad viskoosist rätikud
- Rätikuid niisutav lahus on lõhna- ja alkoholivaba
- Lai virutsiidne spekter
- Antimikroobne toime alates 3 minutit

## NÄIDUSTUSED

Kasutatakse invasiivsete ja mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.\* Endoskoopiliste instrumentide üle pühkimiseks kohe pärast kasutamist ja enne lõpp-desinfitseerimist. \*Näide: ultraheliandurid, vererõhumonitorid, glükomeetrid, refleksihaamid jne.

## OMADUSED

- Rätiku koostis: 100% viskoosi (tihedus 50g/m<sup>2</sup>)
- Rätiku suurus: 180x200 mm (King size 200x360 mm)
- 5 ml SurfaSafe Premium lahust ühe rätiku kohta

## KOOSTIS

Rätikud on niisutatud puhastava ja desinfitseeriva lahusega: didetsüüldimetüülammooniumkloriidi (CAS No 7173-51-5: 3 mg/g), mitteioonsed pindaktiivsed ained, abiained.

Rätik on  
ühekordseks  
kasutamiseks




# WIP'ANIOS Excel


## KASUTUSJUHISED



Võta pakendist rätik.  
Pärast pakendi tarvitamist  
tuleb see hoolikalt  
sulgeda.

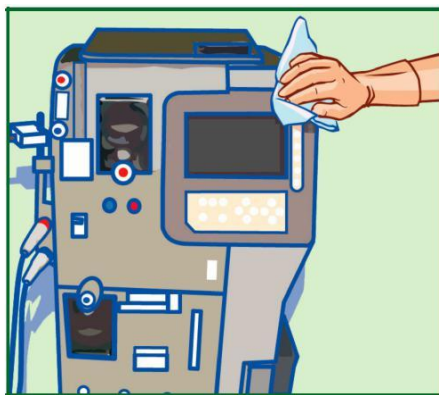

Pühi desinfitseeritav pind  
rätikuga üle. Tugeva saastmise  
korral korrata protseduuri uue  
rätikuga. Jälgida toimeaega.

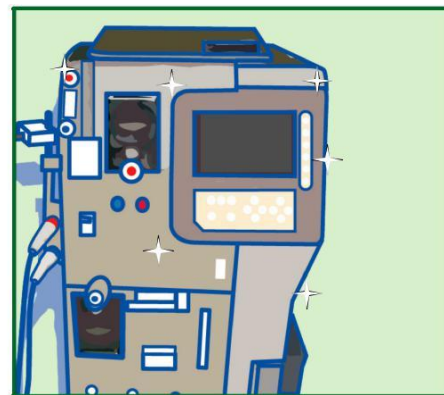

Lase kuivada. Pindade loputamine  
ei ole vajalik, v.a. kui need on  
otseselt kokkupuutes  
limaskestadega. Kontrolli, et  
pakend oleks korralikult suletud.

NB: Desinfektsioon WIP'ANIOS EXCEL-ga  
ei asenda ettenähtud leotus-  
protseduuri

## MIKROBIOLOOGILINE SPEKTER

Immutav lahus on:

Mille vastu	Standardid	Kontaktiaeg
Bakterid	EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561	3 minutit
	EN 13727 ERV vastu, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM	1 minut
	E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM	
Pärmiseened	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	5 minutit
Hallitused	EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562	20 minutit
Viirused	Rotaviirus, PRV, HSV, Vaktsiinia viirus, BVDV	1 minut
	Polüomaviirus SV40	5 minutit
	Noroviirus	30 minutit

## HOIATUSED

Ohtlik – jälgi kasutusjuhendis ja ohutuskaardil  
märgitud ettevaatusabinõusid.  
(Vastavalt Euroopa direktiividele seoses keemiliste  
toodete klassifikatsiooni ja märgistusega).  
Hoiustamine: +5°C kuni +35°C.  
Toode kvalifitseerub vastavalt EL Direktiivile  
93/42/EEC Klass lib meditsiiniseadmete hulka.

## PAKEND

Pakendis 100 rätikut 180x200 mm  
King Size: 350 rätikut 200x360 mm

6 tk kastis  
Ämber

Maaletooja: Hygeia / OÜ e-mail: kadi@hygeia.ee / Tel. 521 6661

Laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin  
59260 Lille-Hellemmes - France  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67  
68 www.anios.com

